

Oppdatert informasjon vedr. prøvetakning for SARS-CoV-2

1. Fra 05.03.20 ber vi om kun en prøve.

FHI har godkjent at våre negative resultater ikke lenger trenger verifisering. Positive resultater blir sendt videre for bekreftelse i de første 5 tilfellene.

2. Ikke putt to pensler ned i samme prøvetakningsrør.

Ta prøve først fra nasofarynks, bruk deretter den samme pinnen i svelget.

Vi har sammen med FHI tidligere sagt at det er greit med 2 prøvepinner i samme prøvetakningsrør. Dette går vi nå tilbake på. 2 pensler i samme rør gir stor risiko for labsmitte; en av penslene blir liggende igjen i prøverøret og må plukkes ut manuelt med pinsett før videre håndtering.

3. Vær nøye med å sprite prøvetakningsrøret før det settes i transporthylse.

Før prøvetakning; merk transporthylsen med fullt navn og fødselsnummer og fukt et papirhåndklede med desinfeksjonssprit.

Ta prøven og skru igjen korken, og plasèr prøverøret på papiret. Skift til rene hansker. Brett det spritede papirhåndkledet rundt prøven uten å komme i direkte kontakt med prøven. Gni godt slik at alle overflater kommer i kontakt med sprit og la den ligge i ca 1 minutt. Sett deretter på identifikasjonslapp (evt. skriv ID: fullt navn og fødselsnummer) på prøverøret og legg den i transporthylse.

Se for øvrig instruksjonsvideo på vår hjemmeside: <https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologi>

Med vennlig hilsen

Einar Nilsen

Avd.sjef, overlege

E-post: enar.nilsen@helse-mr.no