

## Ny analysemetode for anti-TPO i Molde

F.o.m. 10. mai 2021 går medisinsk biokjemi Molde over til ny analysemetode for anti-TPO. Den nye metoden er fra en annen produsent enn den vi har brukt hittil. Den nye metoden er spesifikk for anti-TPO av IgG-type, mens den metoden vi har brukt hittil ikke er spesifikk for IgG. Ny metode har tilnærmet likt referanseområde for voksne, men verdiene kan ikke uten videre sammenlignes med tidligere metode.

### Tolking av testresultater

Områdene (negativ, gråsoner, positiv) som anbefales for evaluering av resultatene, er vist i tabellen nedenfor.

Test	Enhet	Negativ	Gråsoner	Positiv
Ny metode anti-TPO	klU/L	< 25	25 – 35	➤ 35

Inntil videre har vi ikke egne referansegrenser for barn.

NB! Denne metodeendringen gjelder bare for medisinsk biokjemi Molde.

Med hilsen

Jon Kvannes  
Seksjonsoverlege dr.med.  
Medisinsk rådgivar

Cecilie Eikrem Myklebust  
Seksjonsleiar