

Informasjon 03/2022

Universal Transport Medium (UTM) til molekylærbioologiske analyser

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har siden våren 2021 benyttet UTM 3 ml m/swab for utvalgte rekvirenter.

UTM skal nå benyttes av alle våre rekvirenter for alle molekylæranalyser (PCR) der prøvematerialet er hentet fra nasopharynx/ hals/ sår. Dette gjelder:

- Luftveisagens, både atypisk pneumoni og luftveivirus
- Virus (HSV, VZV, EV)



Vær oppmerksom på at UTM er tilsatt antibiotika –disse prøvene kan derfor ikke dyrkes!

Ønskes dyrkning i tillegg til PCR må det tas en ekstra prøve på eSwab.

Prøverør merkes og sendes i transporthylse så raskt som mulig til Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Minner alle rekvirenter om at disse prøvene bør oppbevares i kjøleskap i påvente av transport.

Med vennlig hilsen

Einar Nilsen

Avd.sjef, overlege E-post: einar.nilsen@helse-mr.no