

Klinikk for diagnostikk
Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Nytt prøvetakingsutstyr for påvisning av SARS-cov-2 – Virus Preservation Medium (VPM)

Vi vil nå gå over til å bruke prøvetakingsutstyr fra nasjonalt lager. Viktig:

- Prøvetakningssettet inneholder 2 pensler i forskjellig tykkelse. Den **tynne** penselen skal brukes til kombinert nasofarynks/hals prøve.
- Den tykke penselen kan brukes om det kun tas halsprøve. Dette gir lavere sensitivitet og anbefales bare dersom det ikke lykkes å ta nasofarynksprøve
- Det er svært viktig at det **ikke** settes 2 pensler i samme rør. Dette gir havari i instrumentene våre!
- Prøvetakingsutstyret kan ikke brukes til dyrkning av bakterier, men kan brukes til all PCR-basert diagnostikk. Vi ber om at vårt vanlige prøvetakingsutstyr fra Copan (E-swab) fra nå forbeholdes dyrkningsdiagnostikk og ikke brukes til hverken SARS-cov-2 eller andre PCR-analyser.



Mvh

Einar Nilsen
Overlege/avd.sjef.
Molde 02.09.2020